

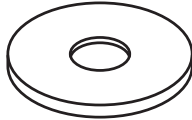
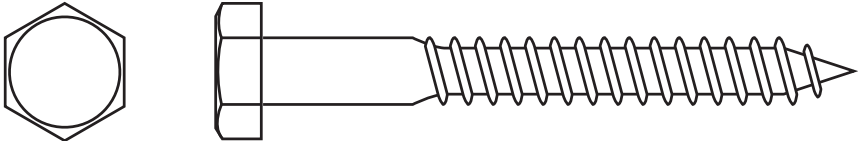



## PT-Rail








PT-WR28R, PT-WR28L

[healthcraftproducts.com](http://healthcraftproducts.com)

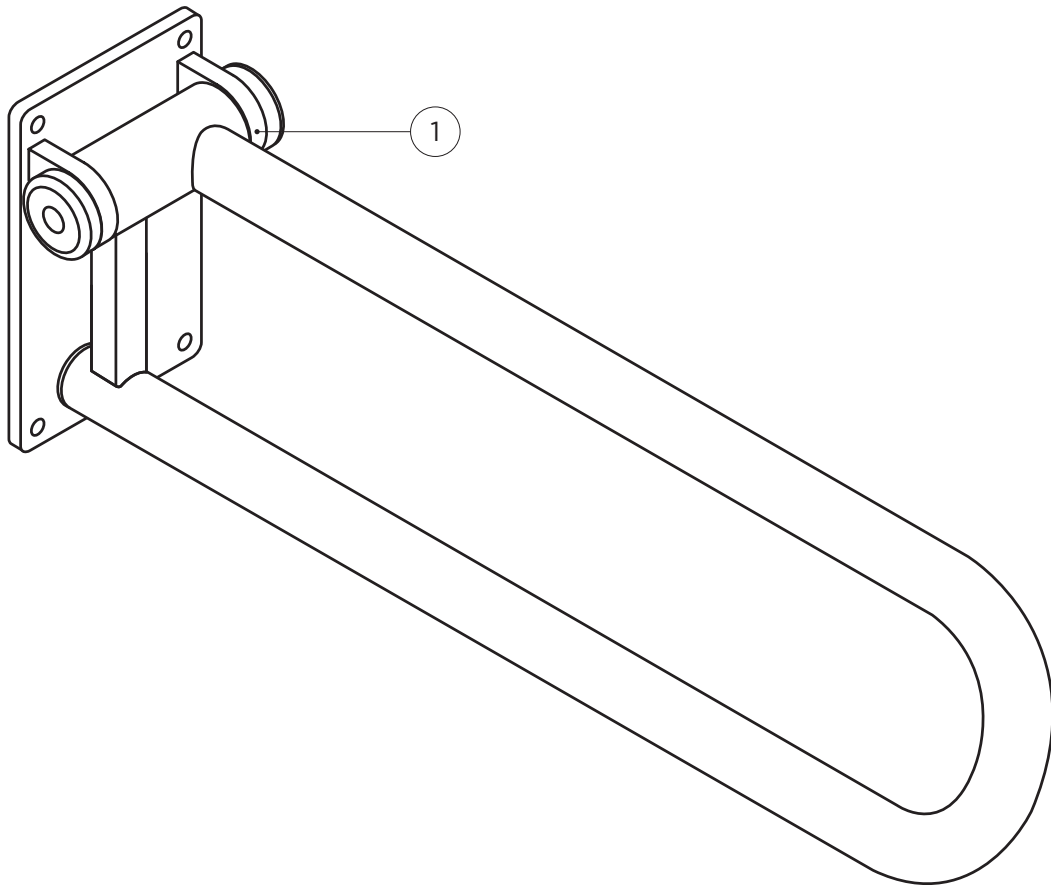

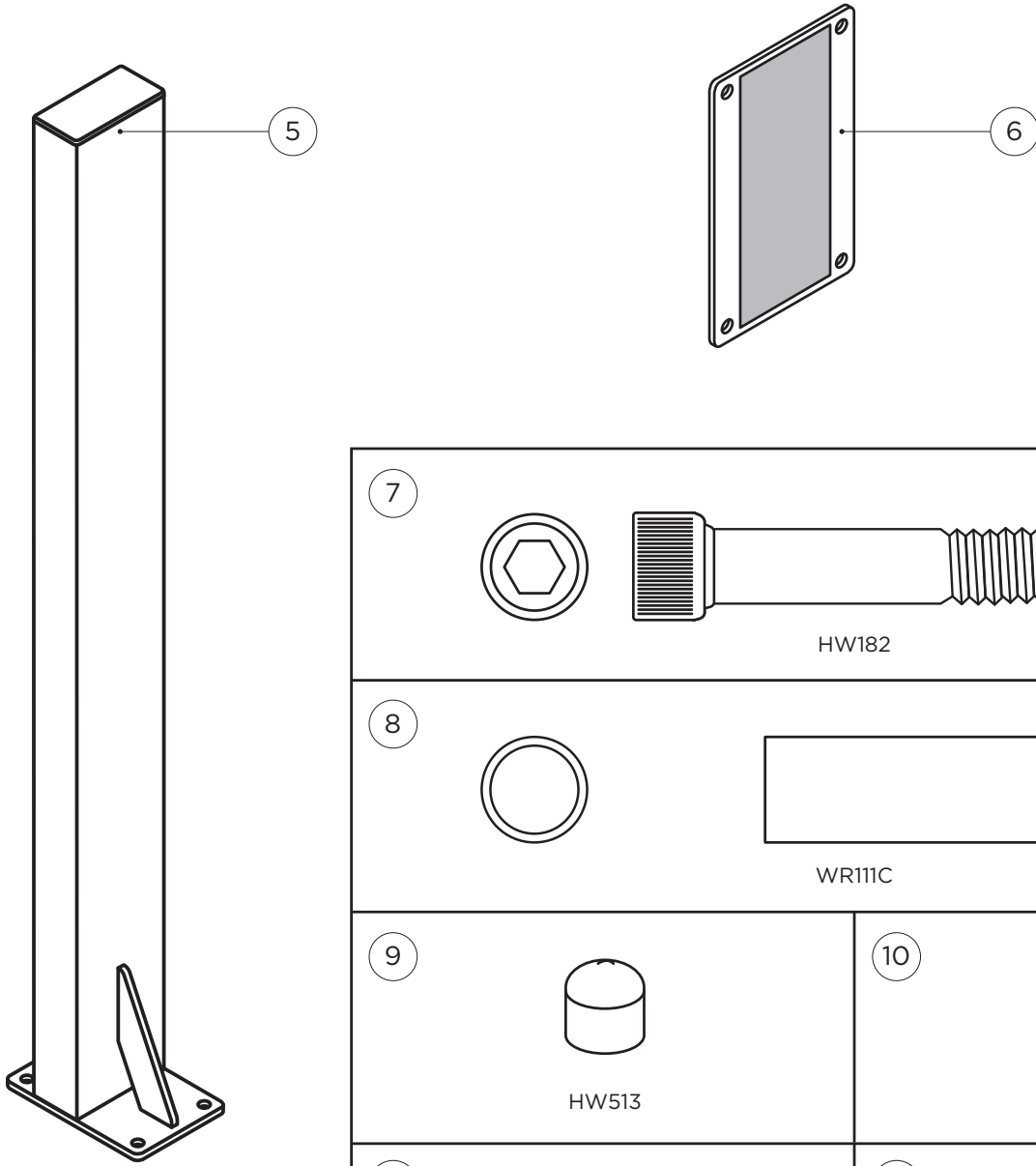
<p>2</p>  <p>HW155</p>	<p>3</p>  <p>HW154</p>
<p>4</p>  <p>HW241</p>	

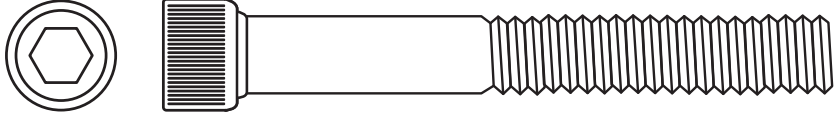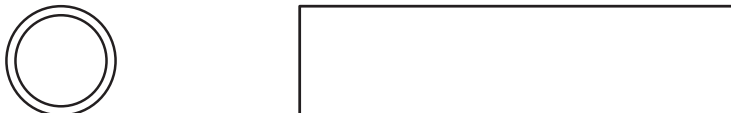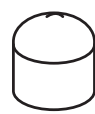

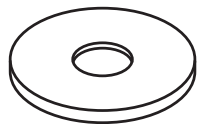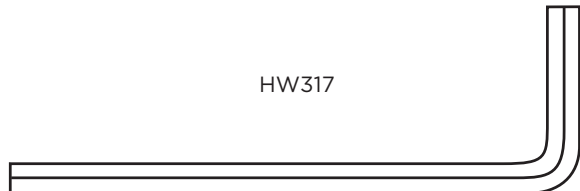
<p>7</p>  <p>HW182</p>		
<p>8</p>  <p>WR111C</p>		
<p>9</p>  <p>HW513</p>	<p>10</p>  <p>HW183</p>	
<p>11</p>  <p>HW402</p>	<p>12</p>  <p>HW407</p>	
<p>13</p>  <p>HW317</p>		


1

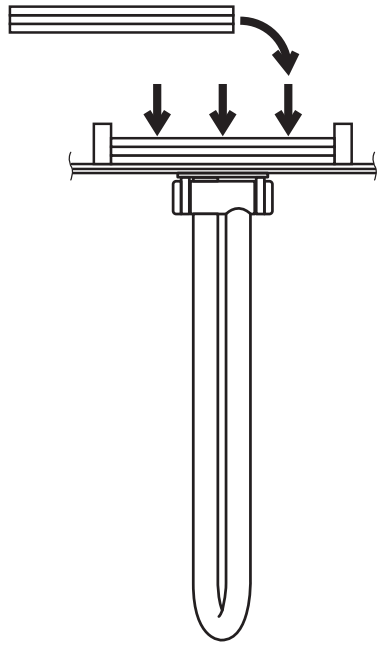


2

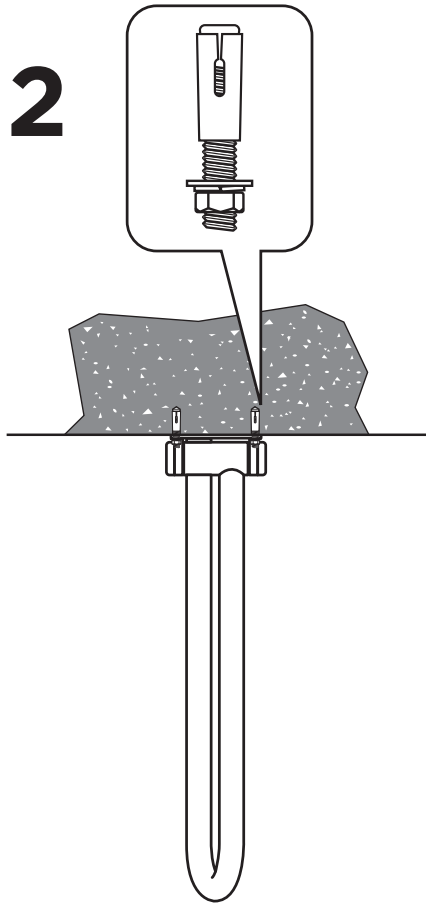



3

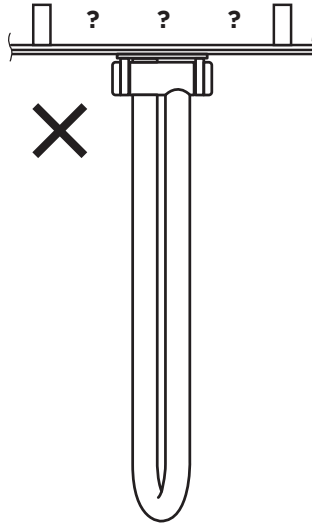

4

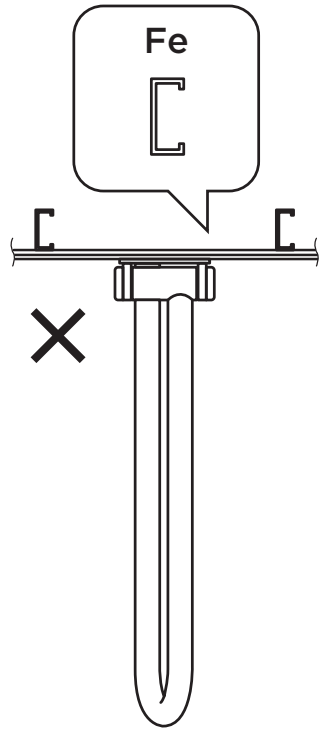

5

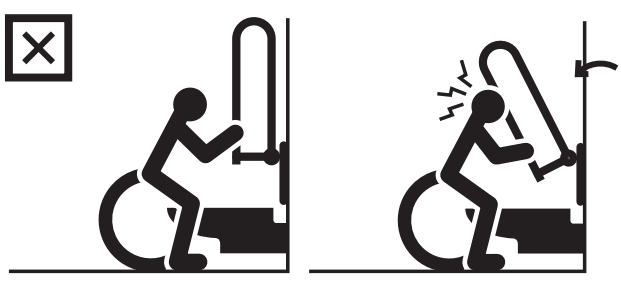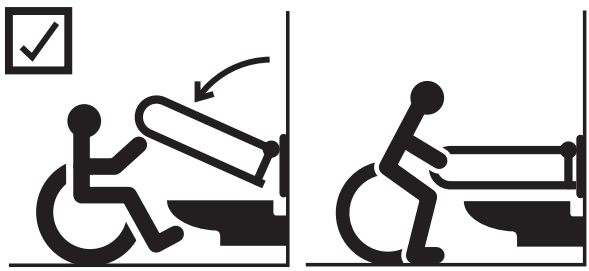


6




7




D

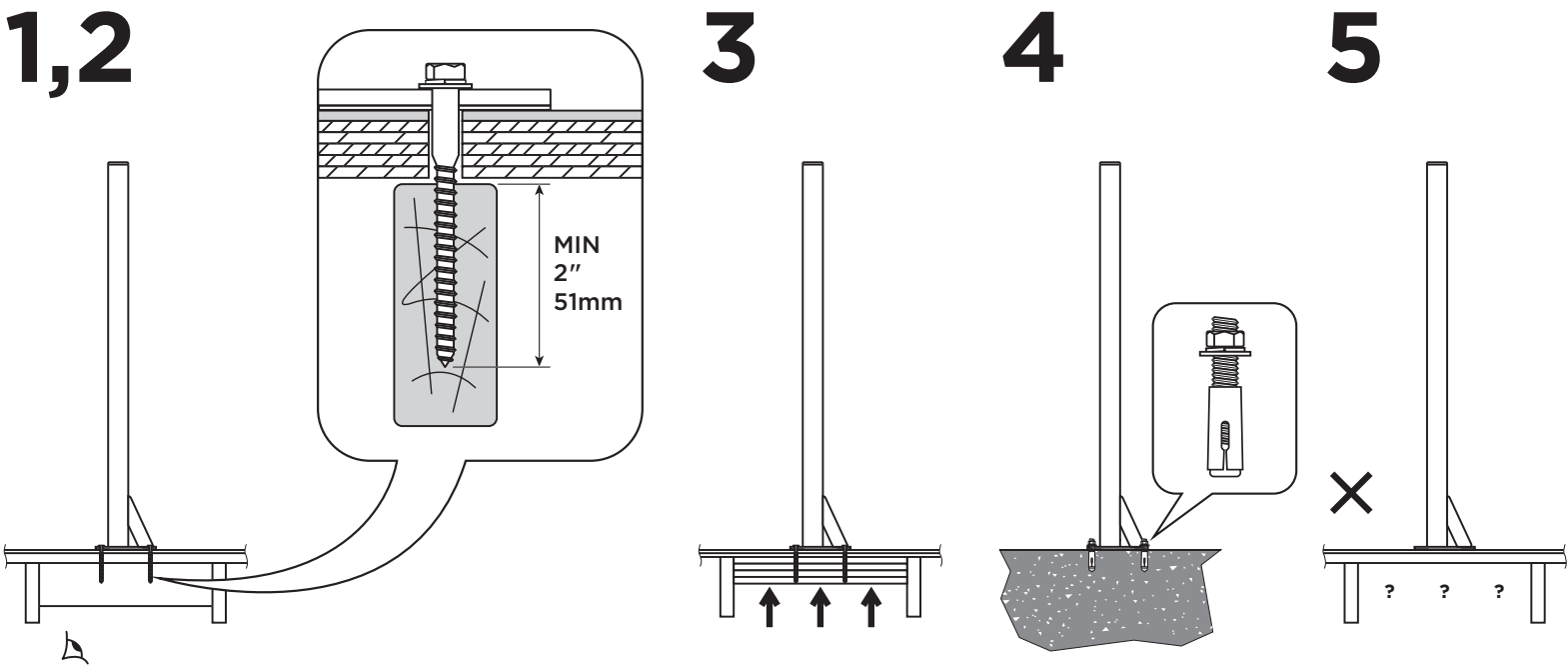


E

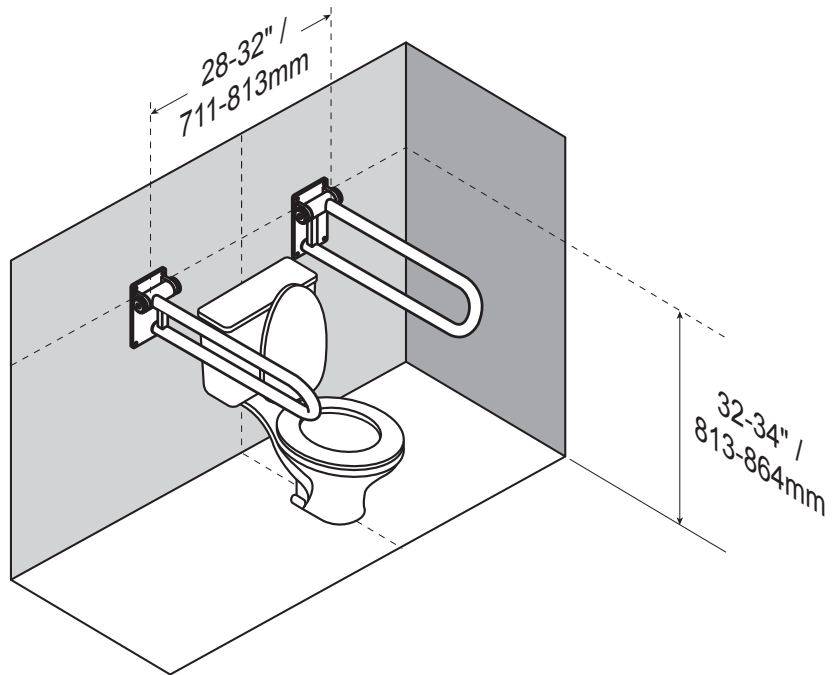


1

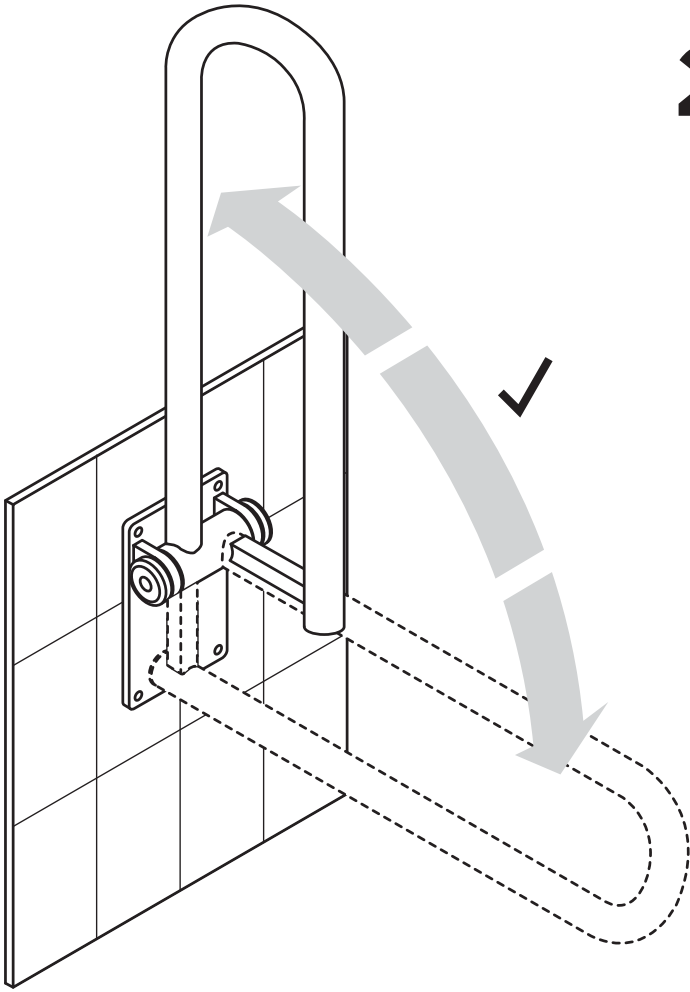


2

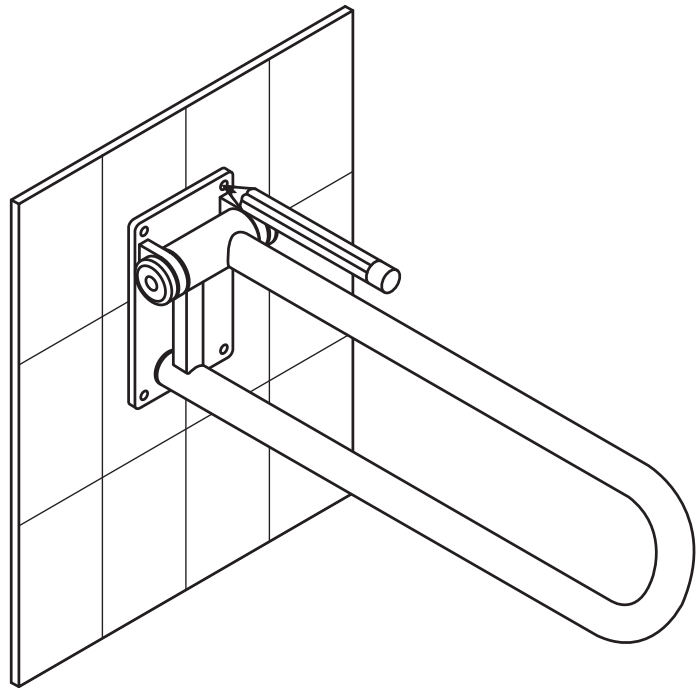


3

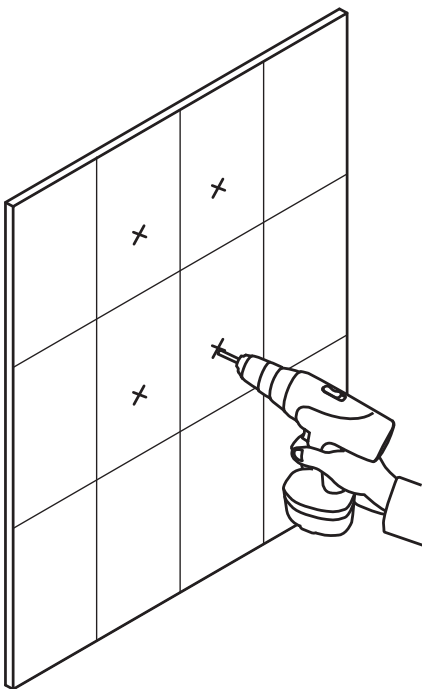


4

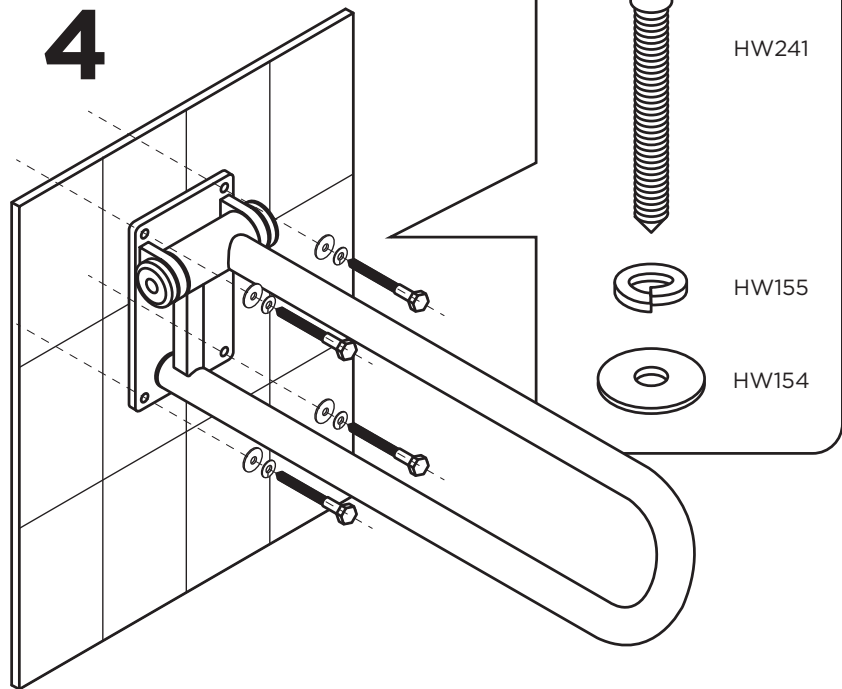


1

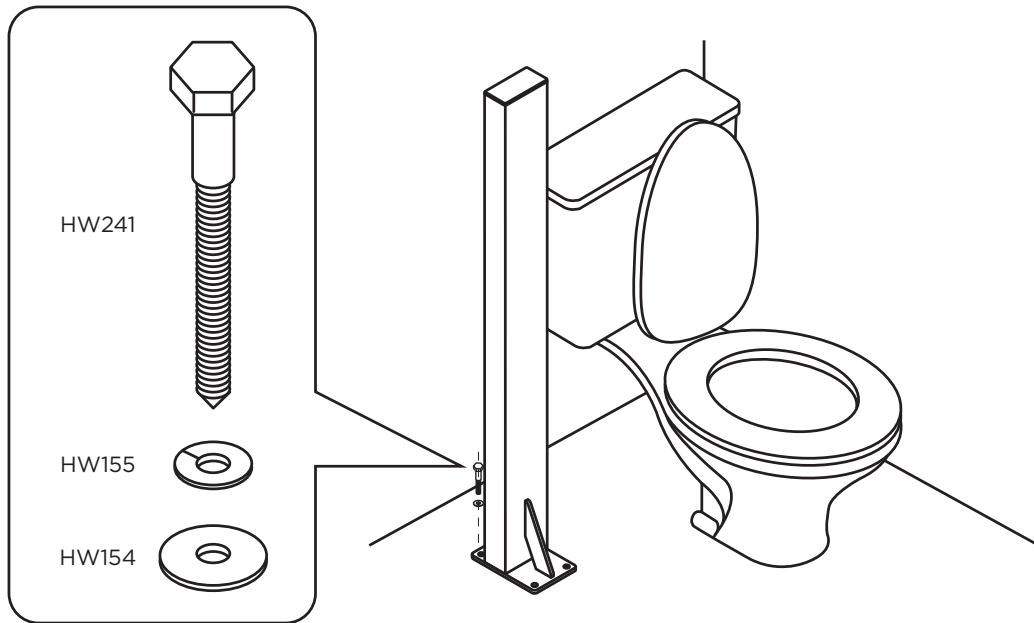


2

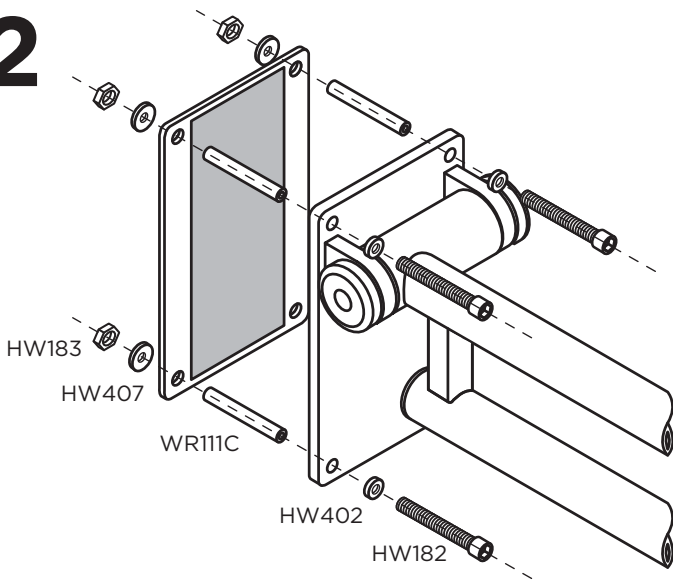


3

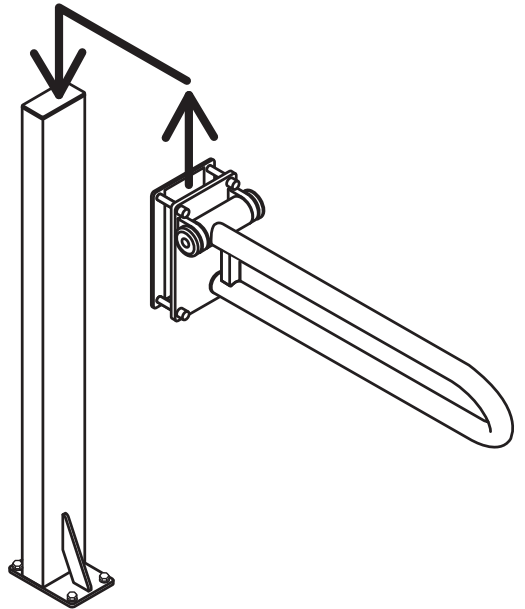


4

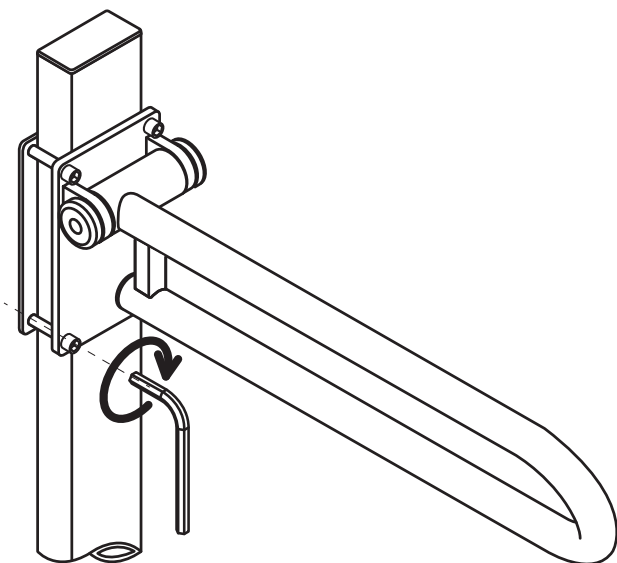


5

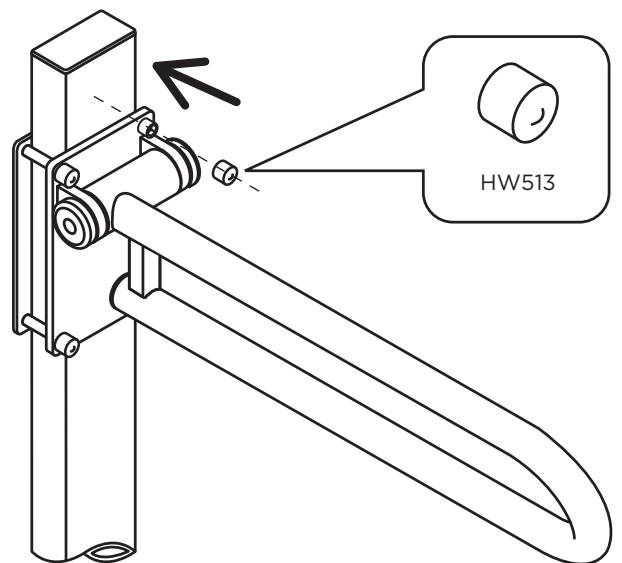

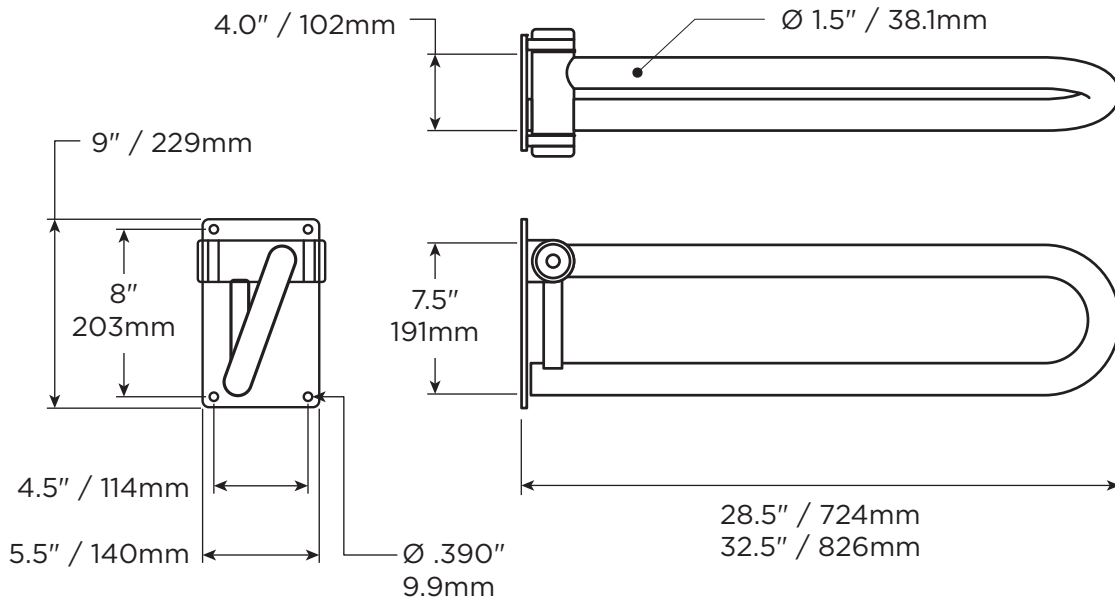

**MAX**  
400lbs  
181kg

**FE**  
15.0lbs  
6.80kg

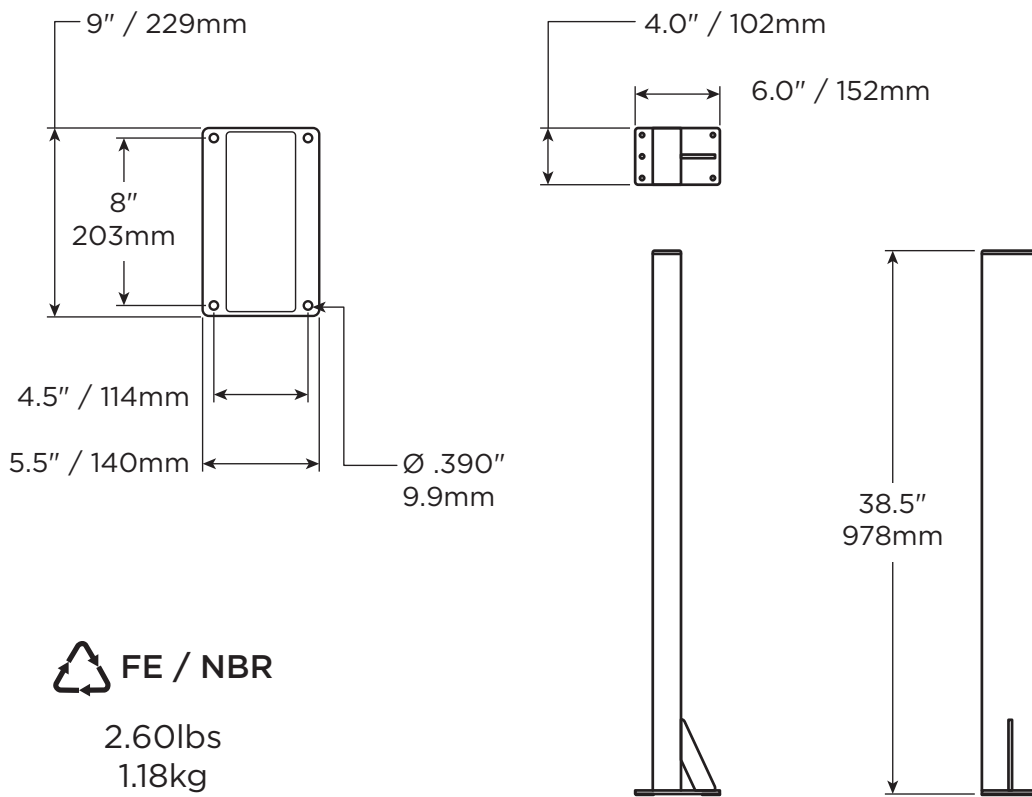


**MAX**  
400lbs  
181kg

**FE / LDPE / NBR**  
16.7lbs  
7.57kg

**FE / NBR**  
2.60lbs  
1.18kg




1

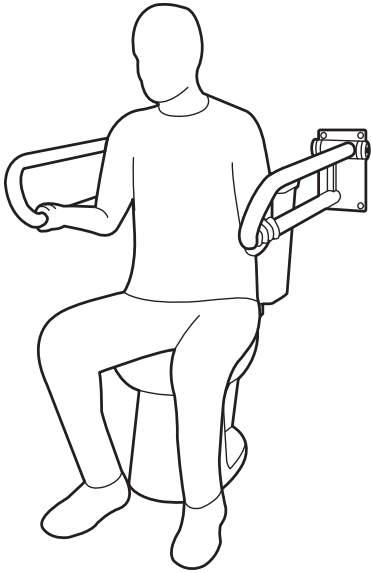


3




3

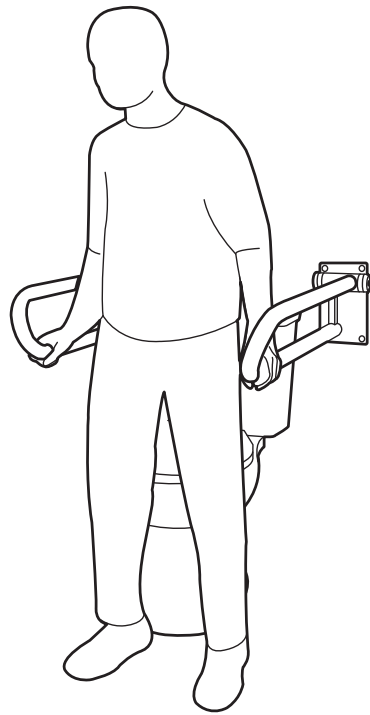


1

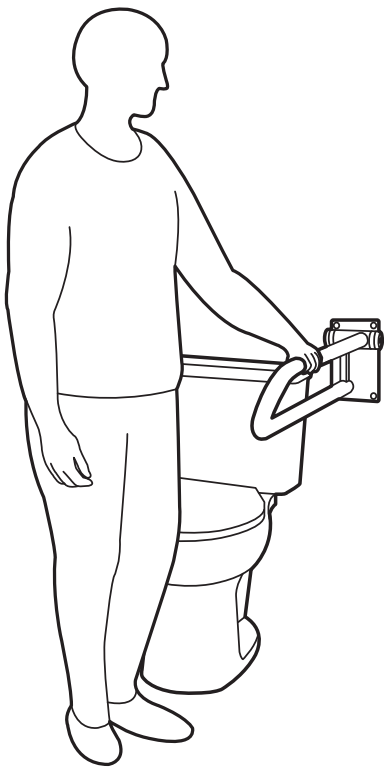

3

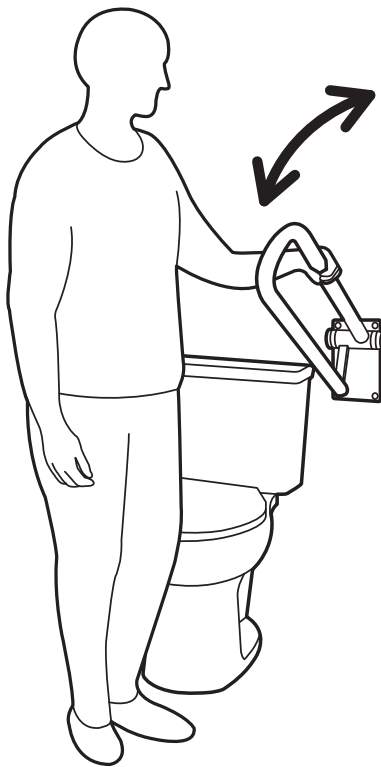

3

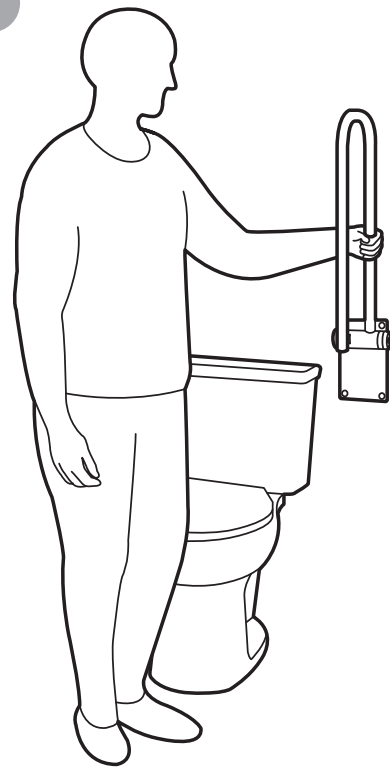

# Svenska

## ÖVERSIKT

Tack för att du har valt P.T.Rail-systemet från HealthCraft. Läs igenom och se till att du förstår anvisningarna i den här handboken. Spara handboken för framtida bruk. Du ansvarar själv för att se till att ditt P.T.Rail-system monteras, installeras och underhålls ordentligt. Underlåtelse att följa anvisningarna i den här handboken kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Om du inte klarar av att utföra det arbete som beskrivs, rekommenderar vi att du låter en behörig hantverkare installera P.T.Rail-systemet.

P.T.Rail är en högkvalitativ nedfällbar stödstång av handelskvalitet som är avsedd för användning bredvid en toalett. P.T.Rail har ett vinklat handtag som hjälper till att minska belastningen när du greppar den lägre stödstången. P.T.Rail är avsedd för måttlig belastning vertikalt och horisontellt för att tillhandahålla stöd vid sittande och stående ställning för personer med nedsatt rörlighet. P.T.Rail är avsedd att ENDAST belastas i nedfällt läge – stödhandtaget är inte avsett att belastas i något annat läge. P.T.Rail-stödet är avsett att fällas upp när det inte används. Ett friktionsgångjärn ser till att den inte sänks oavsiktligt när den är i uppfällt läge. P.T.Rail installeras med lämpliga fästen på en bärande vägg.

Golvhållaren är en golvmonterad enhet som är avsedd att fungera som monteringsplats för P.T.Rail (vid tillfällen då väggmontering inte är möjligt). Golvhållaren installeras med lämpliga fästen på ett bärande golv. P.T.Rail kan justeras i höjddled på golvhållaren. Medföljande fästelement måste användas om P.T.Rail installeras i golvhållaren.

Maxvikten för en användare av den här produkten är 181 kg. Obs! Produkten är inte avsedd att stödja full kroppsvikt. Varken P.T.Rail eller golvhållaren får användas på något annat sätt än enligt beskrivningen ovan.

## BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI

Den ursprungliga köparen får en begränsad livstidsgaranti som täcker fel i material och tillverkningen av produkterna. Garantin gäller inte produkter som har skadats till följd av felaktig användning, genom olyckshändelse, modifiering, normalt slitage, kontakt med eller missfärgning från trämaterial, eller användningen av frätande eller slipande rengöringsmedel.

Köparen samtycker härmed till att gottgöra, försvara och hålla HealthCraft Products Inc. skadelösa från alla betalningsskyldigheter, anspråk (med eller utan grund), förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, följdskador och rimliga arvoden) som uppstår till följd av köparens specifikation, tillämpning eller felaktiga användning av varor som beskrivs här, samt köparens försummelse eller vårdslöshet. HealthCraft Products Inc. bär inget ansvar för skador som uppstår till följd av tjänster som utförs av tredje part eller felaktig installation, felaktig användning eller tillämpning av varor som säljs av HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. bär inget ansvar för eventuella vinster eller särskilda eller indirekta skador eller följdskador, eller för kostnaden av korrigerande arbeten som utförs utan godkännande från HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. totala betalningsskyldighet ska inte under några omständigheter överstiga inköpspriset för varorna som anges här. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

HealthCraft Products Inc.  
2790 Fenton Road  
Ottawa, Canada  
K1T 3T7



Gate 88  
Kanalgatan 45B  
Skellefteå, Sweden  
93123



Distribueras av Now Boarding AB i Sverige.

## LEVERANSINNEHÅLL – P.T.RAIL

### FIGUR A.

1. P.T.Rail
2. Fjäderbricka, 1/4" (× 5)
3. Plan bricka, 1/4" (× 5)
4. Tråskruv, längd 1/4" x 3" (× 5)

## LEVERANSINNEHÅLL – GOLVHÅLLARE

### FIGUR B.

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5. Golvhållare                    | 10. Mutter, 3/8"-16, S/S (× 4)    |
| 6. Fästplatta                     | 11. Fjäderbricka, 3/8", S/S (× 4) |
| 7. Skruv, 3/8"-16 × 3", S/S (× 4) | 12. Plan bricka, 3/8", S/S (× 4)  |
| 8. Plasthölje (× 4)               | 13. Insexnyckel, 5/16"            |
| 9. Vinyllock (× 4)                |                                   |

## INSTALLATIONSVARNINGAR FÖR P.T.RAIL

### FIGUR C.

1. P.T.Rail ska installeras på väggar som är konstruktionsmässigt lämpliga. Använd kortlingar vid behov.
2. Om installation i betongvägg krävs rekommenderar vi hylsexpander eller kilankare som passar till golvkonstruktioner.
3. VARNING – Installera inte P.T.Rail om du inte känner till hur konstruktionen bakom väggen ser ut.
4. VARNING – Sätt inte fast P.T.Rail i metallreglar.
5. VARNING – Stödstången ska endast användas som stöd i nedfällt läge.
6. VARNING – Klämrisk mellan stödstången och väggplattan.
7. VARNING – Stödstången och badkaret är hala när de är våta. Medföljande fästelement är endast avsedda att användas i träkonstruktion. Om du använder andra fästelement ska du se till att de håller för minst 272 kg.

## INSTALLATIONSVARNINGAR FÖR GOLVHÅLLARE

### FIGUR D.

1. Golvhållaren ska installeras på golv som är konstruktionsmässigt lämpliga.
2. Det bästa är att passa in och fästa golvhållaren direkt i golvbjälklag.
3. Om konstruktionen på önskad installationsplats inte är godtagbar kan du använda kortlingar.
4. Om installation i betonggolv krävs rekommenderar vi minst 5/16" hylsexpander eller kilankare.
5. VARNING – Installera inte golvhållaren om du inte känner till hur konstruktionen under golvet ser ut.

## FÖRESLAGNA PLACERINGAR AV P.T.RAIL

### FIGUR E.

För att fastställa den bästa möjliga installationsplatsen rekommenderar vi att du håller stödstången på plats och simulerar de olika rörelserna (t.ex. när man sätter sig, ställer sig upp, sträcker sig efter något osv.). Rekommenderad höjd för stödstången är 81–86 cm. Om du installerar stödstången på båda sidor av toaletten, rekommenderar vi en bredd på 71–81 cm mellan de övre stödstångerna.

## INSTALLATION AV P.T.RAIL I TRÄKONSTRUKTION

### FIGUR F.

1. Håll P.T.Rail på önskad plats och säkerställ att stödstången kan flyttas obehindrat åt alla håll och att utrymmet ovanför stödstången är tillräckligt för att den ska kunna fällas upp.
2. Använd väggplattan som mall och märk upp hålens placeringar.
3. Förborra lämpliga hål för fästelementen.
4. Sätt fast P.T.Rail i väggen med hjälp av lämpliga fästelement.

## INSTALLATION AV GOLVHÅLLARE I TRÄKONSTRUKTION FIGUR G.

1. Sätt fast golvhållaren i golvet med hjälp av lämpliga fästelement.
2. Sätt fast fästplattan på baksidan av P.T.Rail.
3. Sätt i fästplattan med P.T.Rail från golvhållarens ovansida.
4. När P.T.Rail sitter i önskad höjd fäster du den genom att dra åt skruvarna.
5. Sätt dit vinyllocken för att täcka skruvhuvudena.

## TEKNISKA UPPGIFTER

Se figur H.

## PRODUKTANVÄNDNING

Se figur I.