

Rekonditionering & Underhåll Superpole System

Superpole system är ett uppresningsstöd som monteras mellan golv och tak.

Huvudprodukten och dess tillbehör är samtliga tillverkade i rostfritt stål och pulverlackerade med vit färg i två lager.

Handgreppen som sitter monterade på huvudprodukten samt några av tillbehören är tillverkade i PVC skum.

Superpole samt dess tillbehör rengörs bäst med ytdesinfektion innehållande alkohol samt en trasa. För att få bort eventuella fläckar som inte går bort med trasa kan en mjukare borste, diskborste eller liknande användas. Detta skadar inte produkterna men undvik att putsa för hårt så att produkterna inte blir repiga.

Några restriktioner på rengöringsmedel som inte får användas finns inte för produkterna.

Exempel på rengöringsmedel som rekommenderas syns nedan.



Innehåller Alkohol



Utan Alkohol



Rengöringsborste



Rengöringsborste



Underhållsschema

Varje Vecka	<p>Torka av produkterna med ytdesinfektion om möjligt. Alt Tvål och vatten. Använd en trasa eller torkduk.</p> <p>Löpande underhåll ökar livslängden och bibehåller kvaliteten på produkterna.</p>
Varje Månad	<p>Torka av produkterna med ytdesinfektion om möjligt. Alt Tvål och vatten. Använd en trasa eller torkduk. Vid svårare fläckar eller liknande, använd en mjukare borste och putsa lätt. Använd en mjukare borste och putsa lätt.</p> <p>Löpande underhåll ökar livslängden och bibehåller kvaliteten på produkterna.</p>
Varje År	<p>Torka av produkterna noggrant med ytdesinfektion.</p> <p>Dra och ryck i stången för att känna av stabiliteten i monteringen. Ansvaret ligger på användaren att se till så att stången underhålls och behandlas på ett korrekt sätt. Ifall stången på något sätt känns ostabil eller du tror att den kan ha utsatts för skada, kontakta hjälpmedelscentralen eller leverantör vid frågor info@nowboarding.se</p>